

Instrucciones de uso MASCARILLA:

1) Sujete la mascarilla con una de sus manos, con el clip nasal orientado hacia los dedos y las cintas

elásticas de sujeción colgando libremente.

2) Coloque la máscara sobre la cara, de forma que le cubra totalmente la nariz y la boca. El clip nasal

debe quedar sobre la nariz.

3) Con una mano sostenga la máscara contra la barbilla para cubrir completamente la nariz y la boca.

Tire de la banda y colóquela por detrás de sus orejas.

4) Con las dos manos a la vez, ajuste el clip nasal al contorno de la nariz y asegúrese de que los bordes de la máscara están en contacto directo con la cara.

5) Prueba de ajuste-fuga: Permite comprobar si se ha puesto la máscara de forma correcta. Para ello

cubra la máscara con las dos manos y exhale con fuerza, creando una presión positiva en el interior.

Si detecta fugas a través de los bordes, habrá que modificar la posición de la máscara sobre la cara,

reajustar el clip nasal, y/o modificar la posición y tensión de las cintas elásticas de sujeción. Repita este proceso hasta que no detecte fuga alguna.

6) No utilice los equipos NR* para más de un turno de trabajo.

7) Utilice bajo las recomendaciones del fabricante, siguiendo las instrucciones del etiquetado.

8) Deseche la mascarilla usada dentro de una bolsa cerrada en el contenedor de orgánicos.