



ADVERTENCIAS:

· Mascarilla solamente para uso personal · En las mascarillas para niños, la colocación y retirada de la mascarilla deberá estar supervisada por un adulto. · Este no es un Equipo de Protección Individual (EPI) · Mascarilla higiénica reutilizable. Esta mascarilla será reutilizable tras un ciclo de lavado a 60° para su total esterilización. "Especificación UNE 0065:2020 Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso"

SIMBOLOS DE LAVADO Y CONSERVACIÓN:

· Producto certificado para 25 ciclos de lavado a 60° C. Tras 25 lavados el acabado podría comenzar a perder propiedades.
· Lavar con detergente neutro. · No usar lejía. No admite secadora.
· Se recomienda planchar a 140° sin vapor entre 10-15 segundos.



Composición: 100% MICROFIBRA POLYESTER **INSTRUCCIONES DE USO DE LA MASCARILLA**

COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA



1 · Lavar las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla

2 · Identificar la parte superior de la mascarilla
3 · Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz.
Si se dispone de pinza nasal, ajustarla a la nariz.



4 · Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar el arnés de cabeza detrás de la misma o a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.
5 · Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.



6 · Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.
7 · Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz (si existe).



8 · Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.
9 · Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.



RETIRADA DE LA MASCARILLA

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

1 · Quitarse los guantes de protección;
2 · Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica;
3 · Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla;
4 · Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica

ELIMINACIÓN DE LA MASCARILLA

Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas se debe advertir que una vez sobrepasado el número máximo de lavados se debe desechar.

Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico. Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarramiento de la bolsa exterior. Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.

LAVADO Y SECADO DE LA MASCARILLA

Se debe realizar un ciclo completo de lavado (humedecer, lavar, enjuagar), con detergente neutro a una temperatura de lavado de 60 °C

· Se debe evitar el contacto entre una mascarilla sucia (a lavar) y la ropa limpia. La persona a cargo del lavado debe protegerse para manejar las mascarillas sucias.
· No se deben utilizar productos que puedan degradar o dañar los materiales y que disminuyan su capacidad protectora.
· Se recomienda que la mascarilla se seque completamente dentro de las 2 h posteriores al lavado. No se debe secar o higienizar con un horno microondas.
· Tanto durante el secado, como en el almacenaje posterior de la mascarilla, se deben evitar los ambientes en los que la mascarilla se pueda volver a contaminar.
· Después de cada ciclo de lavado, se debe realizar una inspección visual (con guantes de protección o manos lavadas). Si se detecta algún daño en la mascarilla (menor ajuste, deformación, desgaste, etc.), se debe desechar la mascarilla.



DURACIÓN DE USO MÁXIMO

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra. Durante el período de uso, la mascarilla solo se puede retirar de acuerdo con las instrucciones



La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar correctamente sobre la cara. No se debe utilizar la mascarilla si está sucia o húmeda. En el caso de que se vaya a almacenar temporalmente se debe evitar el contacto con cualquier superficie. Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.

